

Lietotāja rokasgrāmata



Kas ir Shaker Plus?

Shaker Plus ir profesionāla elpošanas ierīce plaušu sekrēcijas veicināšanai. Shaker Plus ir izstrādāta, ņemot vērā jaunākās gaisa plūsmas tehnoloģijas, un tai nav nepieciešama papildu montāža.

Kā darbojas Shaker Plus?

Shaker Plus korpusa iekšpusē ir atsvarota lodīte. Iepūšot elpu Shaker Plus, lodīte tiek pacelta, un tad pati ar savu svaru atkrīt atpakaļ. Šī pacelšanās un atkrišanas kustība notiek ārkārtīgi lielā ātrumā, un lietotājs to var sajūt kā vibrāciju. Šī vibrācija kopā ar vieglo pretestību, ko izraisa elpošana pret lodīti, rada vairākus pozitīvus ieguvumus.

Gaisa spiediena izmaiņas izraisa sīko elpceļu atvēršanos, izmantojamā plaušu apjoma un elpošanas efektivitātes palielināšanos. Vibrācijas iespaidā krēpas sabiezina un pārvietojas, un pastiprinātā gaisa plūsma palīdz krēpām nokļūt līdz lielajiem elpceļiem un, viegli klepojot, izvadīt tās pavisam.

Shaker Plus var lietot jebkur, lai vienkārši un ērti atbrīvotos no pārmērīga krēpu daudzuma un ar to saistītām problēmām. Shaker Plus var izmantot tādu hronisku slimību kā HOPS, astma, emfizēma gadījumā un tādu akūtu veselības problēmu kā dziļš klepus, gripa un bronhīts gadījumā.

Attirot elpceļus, samazinās iespēja, ka attīstīsies plaušu infekcijas vai veidosies plaušu bojājumi. Tāpat, samazinoties elpas trūkumam un nespēkam, uzlabojas plaušu funkcijas.

Kā lietot Shaker Plus

Atrodieties sēdus vai guļus stāvoklī, ar lūpām cieši aptveriet iemuti.

Pārliecinieties, ka iemutis novietots horizontālā stāvoklī.

Ielelpojiet caur degunu un izelpojiet caur muti.

Turiet ierīci tā, lai tā plaušās radītu vislielāko vibrāciju. To varat viegli sajūt, izelpas laikā uzliekot plaukstu uz krūtīm.

Viegli klepojot, atbrīvojieties no krēpām regulāri vai tad, kad tas nepieciešams.

Piesardzības pasākumi

- Shaker Plus paredzēta vairākiem lietotājiem. Pirms to lieto cits pacients, higiēnas nolūkā tā jāsterilizē autoklāvā.
- Shaker Plus nedrīkst lietot cilvēki, kam ir pneimotorakss.
- Cilvēki, kuriem ir smagas sirds un asinsvadu slimības, Shaker Plus drīkst lietot tikai pēc konsultēšanās ar ārstu.
- Neizdariet nekādas izmaiņas izrakstīto zāļu lietošanā vai nozīmētajā ārstēšanās plānā bez konsultēšanās ar ārstu.
- Bērniem, kas jaunāki par 16 gadiem, ierīce jālieto pieaugušo uzraudzībā.
- Ja, lietojot Shaker Plus, jums sareibst galva, pārtrauciet vingrinājumu un elpojiet mierīgi caur degunu, līdz šī sajūta pāriet. Ja jums sareibst galva katru reizi, kad lietojat Shaker Plus, ik trešo elpas vilcienu ielelpojiet un izelpojiet, neizmantojot Shaker Plus. Ja galvas reibšana nepāriet vai, lietojot Shaker Plus, rodas kādas citas problēmas, nekavējoties pārtrauciet lietot ierīci un konsultējieties ar savu ārstu.
- Shaker Plus ir izstrādāta, lai tiktu izmantota plaušu sekrēcijas veicināšanai. To nav paredzēts izmantot nekādam citam nolūkam vai mērķim. Šī ierīce nav paredzēta nekādu slimību diagnosticēšanai, ārstēšanai vai profilaksei.
- Izmantojiet tikai ierīci, kas iegādāšanās brīdī atradusies aizlīmētā iepakojumā.
- Uzglabājiet ierīci vēsā, sausā vietā, neuzglabājiet to karstumā vai tiešos saules staros.
- Lai nodrošinātu higiēnu, ierīce atrodas aizlīmētā iepakojumā, un to nav iespējams atgriezt pārdevējam, ja iepakojums ticis atvērts.

Tehniskā specifikācija

Korpus, konuss un vāciņš izgatavoti no zem spiediena lieta poliimīda. Lemuša materiāls ir PVC, kas nesatur lateksu. Atsvartā lodīte izgatavota no niķelēta tērauda.

Apkope un uzturēšana

Iesakām jums veikt Shaker Plus apkopi ikreiz pēc tās lietošanas, jo lietošanas laikā Shaker Plus ir pakļauta siekalu iedarbībai. Noņemiet iemuti, atskrūvējiet apvalku un izņemiet lodīti un iekšējo konusu. Visas detaļas nomazgājiet ziepjūdenī, noskalojiet tīrā ūdenī, kārtīgi izžāvējiet un salieciet atkal kopā. Iesakām vienu reizi nedēļā ierīci nomazgāt, izmantojot ieteiktās mazgāšanas tabletes.

Saistību atruna

Shaker Plus nav rotallīeta. Šis izstrādājums paredzēts vienīgi elpošanas vingrinājumu veikšanai. Izmantošana jebkādiem citiem mērķiem nav ieteicama. Šī lietotāja rokasgrāmata izmantojama tikai informatīvam nolūkam.

POWERbreathe International Ltd. saistībā ar šo lietotāja rokasgrāmatu vai saistībā ar tajā aprakstītajiem izstrādājumiem neveic nekādas pārstāvniecības vai garantijas. Saistībā ar norādītā aprīkojuma lietošanu vai tās rezultātā radušies sekām nevar tikt celtas nekādas pretenzijas vai prasības. POWERbreathe International Ltd. neuzņemas atbildību par jebkādu kaitējumu, tiešu vai nejašu, secīgu vai speciālu, kas var būt radies no vai saistīts ar šī materiāla izmantošanu vai tajā aprakstīto izstrādājumu izmantošanu.

Shaker Plus ir patentēts izstrādājums, un tā dizainparauga autortiesības ir aizsargātas. Visas tiesības aizsargātas. Specifikācijas var tikt mainītas bez īpaša paziņojuma saistībā ar ražotāja pastāvīgās attīstības programmu.

POWERbreathe logotips ir POWERbreathe Holdings Ltd. reģistrēta preču zīme.

Visi POWERbreathe izstrādājumu nosaukumi ir POWERbreathe Holdings Ltd. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

Tipogrāfiskas iespēšanas brīdī visa informācija ir pareiza.

Ražotāja ierobežotā 12 mēnešu garantija

Šī garantija pircējam nodrošina noteiktas juridiskas tiesības. Pircējam var būt arī citas likumā noteiktas tiesības. Ar šo POWERbreathe International Ltd. garantē pircējam, kura vārds ir pienācīgi iegrāmatots, ka pārdotajam izstrādājumam nav nedz materiālu, nedz ražošanas defektu.

POWERbreathe International Ltd. pienākums saskaņā ar šo garantiju aprobežojas ar tādas detaļas vai detaļu remontu vai nomainīšanu, kas pēc pārbaudes atzītas par defektīvām materiālu vai izgatavošanas ziņā. Ierīces nepareiza vai neatbilstoša lietošana vai negadījumi, piesardzības pasākumu neievērošana, nepareiza apkope vai izmantošana komerciālos nolūkos, ieplaisājais vai salūzītais korpusis ir gadījumi, uz ko šī garantija neattiecas. Viena gada garantijas laikā izstrādājums tiks vai nu salabots (ja tas būs iespējams) vai apmainīts bez maksas. Garantija neattiecas uz bojājumiem vai to izraisītām sekām, kas radušās POWERbreathe International Ltd. neautorizēta servisa darbības rezultātā.

Garantija profesionālai vai komerciālai izmantošanai, vai arī izmantošanai ārstniecības iestādēs ir ierobežota līdz 3 mēnešiem (90 dienām) kopš iegādes datuma. Visi pārējie nosacījumi paliek nemainīgi.

Mīnētās garantijas ir skaidri noteiktas ar citām garantijām, tai skaitā norādīto pārdošanas un / vai izmantojamības noteiktam mērķim garantiju.

Lai aktivizētu garantiju, lūdzu reģistrējiet savu Shaker Plus pirkumu tīmekļa vietnē www.powerbreathe.com/warranty.

Centrālais birojs:

POWERbreathe International Ltd
Northfield Road, Southam,
Warwickshire CV47 0RD, England, UK
www.powerbreathe.com
Tālrunis: +44 (0) 1926 816100



1. klases
medicīniskā ierīce
MDD 93/42/EEC

ECRER POWERbreathe International Ltd

E & OE © 01/2011.

Ražots Brazīlijā pēc speciāla POWERbreathe[®] International Ltd. pasūtījuma.

Šo produktu aizsargā patents un dizainparauga autortiesības ©


Izplatītājs:

Remedine SIA
Tāl.: 67161039
info@remedine.lv
www.inhalators.lv

Vienkāršs līdzeklis, kā atbrīvoties no krēpām un tās pavadošajām problēmām

- Pastiprināta gaisa plūsma, pateicoties intensīvākai vibrācijai.
- Pulsējoša pozitīva spiediena radīšana izelpojot.
- Atkrēpošanas stimulēšana, plaušu funkcijas uzlabošanās un aizdusas simptomu atvieglošana.
- Piemērota tādu hronisku slimību kā HOPS, cistiskā fibroze, bronhektāze un bronhīts gadījumā.

IZMANTOŠANAI VAIRĀKĀM PERSONĀM – TO IESPĒJAMS STERILIZĒT AUTOKLĀVĀ VAIRĀKĀRTĒJAI IZMANTOŠANAI • VIENKĀRŠA LIETOŠANĀ

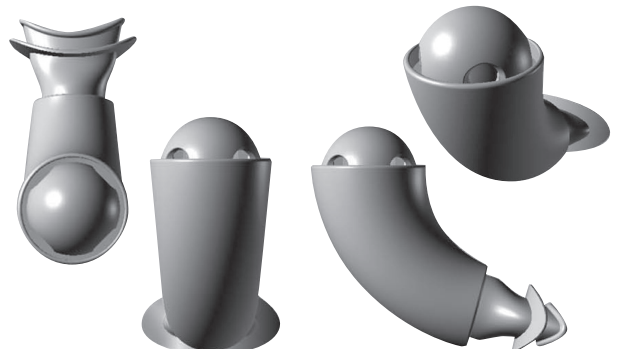

Vieglāka • Ērtāk pārnēsājama • Spēcīgāka gaisa plūsma
Jauns uzlabots materiāls • Efektīvāka