



LightNeb

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
Portatīvs membrānas nebulaizers





LightNeb

Mod. P0318EM

Membrānas vibrācijas tehnoloģijas aerosola nebulaizers

Paldies par Tavu pirkumu. Mūsu mērķis ir pilnībā apmierināt mūsu klientus ar progresīviem produktiem elpceļu ārstēšanai.

Lai iegūtu informāciju par mūsu produktiem, lūdzu, apmeklējiet mūsu mājas lapu www.flaem.it Lūdzu rūpīgi izlasiet lietošanas, lai pareizi lietotu ierīci.



Paredzētā lietošana:

Šī medicīnas ierīce ir elektroniska aerosola terapijas ierīce, kas paredzēta medikamentu izsmidzināšanai (mukolītiskie līdzekļi), medikamentu suspensijas, piemēram, kortekosteroīdi, sāls šķīdums (NaCl), ko rekomendējis, izrakstījis vai ieteicis ārsts, izvērtējot pacienta veselības stāvokli.

Šo ierīci var izmantot medicīnas iestādēs-slimnīcās, klīnikās, kā arī mājās apstākļos.

Ierīces sastāvdaļas

		
1- <i>Ierīces pamatne</i>	2- <i>Medikamentu tvertne un mesh ierīce</i>	3- <i>Iemutis</i>
		
4- <i>Bērnu maska</i>	5- <i>Pieaugušo maska</i>	6-2 AA sārnu baterijas 1,5V

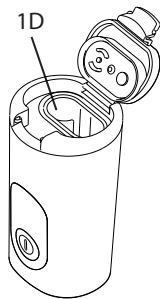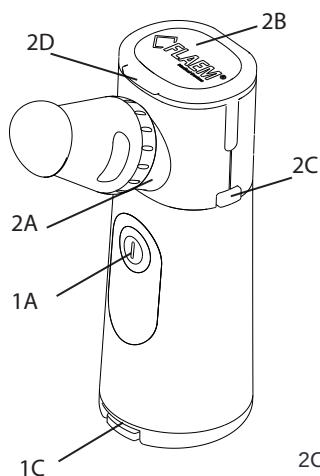

- 1A – Ieslēgšanas poga
 1B – Bateriju nodalījuma aizsargvāciņš
 1C – Bateriju nodalījuma vāciņa āķis
 1D – Bateriju nodalījums
 2A – Maskas vai iemuša uzlikšanas vieta
 2B – Medikamentu nodalījuma vāciņš
 2C – Poga medikamentu nodalījuma noņemšanai
 2D – Āķis medikamentu vāciņam



SVARĪGI BRĪDINĀJUMI

- Šī ierīce paredzēta arī tiešai pacienta lietošanai.
 - Kā ar jebkuru elektrisku ierīci, īpaši bērnu klātbūtnē, LightNeb paredz noteiktus piesardzības pasākumus.
 - Ierīci nedrīkst izmantot kā rotaļlietu. Lūdzu neatstāties bez uzraudzības, kad ierīci lieto bērns.
 - Ja ierīci lieto bērni vai personas, kurām nepieciešama uzraudzība, vai to klātbūtnē, ir nepieciešama stingra pieaugušā uzraudzība, kurš ir izlasījis šo instrukciju.
 - Šo produktu nedrīkst lietot pacienti bezsamaņā vai, kuri spontāni neelpo.
 - Dažas ierīces detaļas ir pietiekami sīkas, lai bērns tās varētu norīt; sargāt ierīci no bērniem bez uzraudzības.
 - Ja ierīce ir bojāta kritiena rezultātā (piemēram, detaļas ir atdalījušās), neizmantojiet ierīci un sazināties ar servisa centru.
 - Nelietojiet citādas baterijas kā vien tādas, kas aprakstītas šajā instrukcijā.
 - Lietojiet tikai zināmu zīmolu baterijas. Vienmēr nomainīt abas baterijas, nejaucot jaunas ar lietotām. Sārma AA Ni-MH vai litija baterijas, ja tās atbilst IEC 60086-4 (ja nav atkārtoti uzlādējamas) un IEC 62133 (ja ir atkārtoti uzlādējamas).
- Uzlādēšanu var veikt izmantojot bateriju lādētāju, kas nav iekļauts šajā

komplektā.


- Vidējais akumulatora darbības laiks ir atkarīgs no izmantotā zīmola.
- Ir ļoti svarīgi izmantot viena zīmola un viena veida baterijas.
- Ja ierīce netiek lietota ilgu laiku, izņemiet baterijas, jo tās var oksidēties un sabojāt ierīces iekšējos kontaktus. Turklāt akumulatorus un ierīci uzglabājiet atbilstoši uzglabāšanas un transportēšanas temperatūrai, kas minēta šajā instrukcijā.
- LightNeb nav piemērots lietošanai, ja tuvumā ir uzliesmojošs anestēzijas maisījums ar skābekli vai slāpekļa oksīdu.
- **Ierīces korpuss ir paredzēts ierobežotai saskarei ar šķidrumiem (neiegremdēt). Nemazgājiet ierīci zem tekoša ūdens vai iegremdējot. Uzmanīgi ievērojiet norādījumus sadaļā "TĪRĪŠANA, SANITĀRIJA, DEZINFĒKCIJA" šajā instrukcijā. Tīrīšanai neizmantot spirtu.**
- Neizmantot ierīci dušā vai vannā.
- Neizmantot ierīci vadot automašīnu vai līdzīgās situācijās, kur jākoncentrē uzmanība un jūs varat nodarīt bojājumus sev vai apkārtējiem, dzīvniekiem vai objektiem apārt.
- Nepakļaujiet ierīci un baterijas ārkārtējai temperatūrai. Sargāt ierīci un baterijas no karstuma avotiem, tiešiem saules stariem un pārmērīgi karstām un mitrām vietām.
- Ja ierīce nedarbojas, kā paredzēts, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru, lai saņemtu paskaidrojumus.
- Remontu drīkst veikt tikai FLAEM pilnvarots personāls, ievērojot ražotāja sniegto informāciju. Neatļauts remonts anulē garantiju un var būt bīstams lietotājam.
- UZMANĪBU Nepārveidojiet ierīci bez ražotāja atļaujas.
- **Ražotājs, importētājs un pārdevējs ir atbildīgs par drošību, uzticamību, un veikspēju tikai tad, ja ierīce tiek izmantota saskaņā ar lietošanas instrukciju.**
- Mijiedarbība: izmantotie materiāli ir pārbaudīti saskaņā ar bioloģiskās saderības standartiem (ISO 10993-5 un ISO 10993-10) atbilstoši Medicīnas ierīču direktīvas 93/42 EEC būtiskajām prasībām. Medicīnas ierīcē izmantotie materiāli ir bioloģiski saderīgi saskaņā ar Direktīvas 93/42/EK ar grozījumu noteikumiem. Tomēr nevar pilnībā izslēgt alerģisku reakciju iespējamību.
- Ja izmantojat nebulaizeru ar vairāku veidu medikamentiem, zāļu atlikumi ir pilnībā jāiztīra pēc katras lietošanas reizes, lai iegūtu visaugstāko higiēnas pakāpi un optimizētu ierīces kalpošanas laiku un darbību.
- Ierīce nesatur detaļas, kuras lietotājs var salabot. Garantija neattiecas uz baterijām vai bojājumiem, kas radušies nepareizu, izlietotu vai neparēzi uzglabātu bateriju dēļ.
- Par visām problēmām un/vai neparedzētiem notikumiem saistībā ar darbību, kā arī par jebkādiem paskaidrojumiem par lietošanu, apkopi vai tīrīšanu ir jāsazinās ar ražotāju.
- Izmantojiet tikai oriģinālos Flaem piederumus un rezerves daļas, FLAEM

atsakās no jebkādas atbildības, ja tas netiek darīts.


- Laiks, kas nepieciešams, lai pārietu no saglabāšanas uz ekspluatācijas apstākļiem, ir aptuveni 2 stundas.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

1 - BATERIJU IEVIETOŠANA

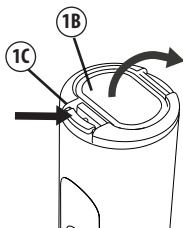

1a. Atveriet bateriju nodalījumu (1D), nospiežot bateriju ndalījum vāciņa āķi (1C) un, paceļot aizsargvāciņu (1B) bultiņu virzienā.

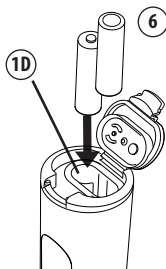

1b. Ievietojiet divas AA baterijas (6), bateriju nodalījumā (1D), pārļiecinoties, ka ievērojat polaritāti.

1c. Aizveriet aizsargvāciņu (1B), pārļiecinoties, ka tas ir ciet.

2 - SAGATAVOŠANĀS





BRĪDINĀJUMS!

Pirms katras lietošanas ierīcei un piederumiem ir jābūt notīrītiem un/vai dezinficētiem kā norādīts 5/6 sadaļā.

Mēs rekomendējam izmantot individuālus piederumus, kā arī ierīci, lai izvairītos no iespējamā inficēšanās riska.

Lietot tikai ar oriģinālajiem Flaem piederumiem.

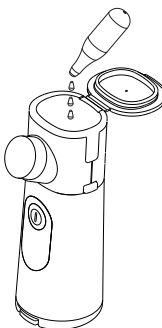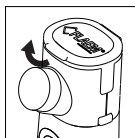

Rūpīgi nomazgājiet rokas pirms rīkojaties ar nebulizatora sagatavošanu.

2.1 Aiz āķīša (2D) paceliet medikamentu nodalījuma vāciņu (2B)

2.2 Pilnībā atveriet medikamentu nodalījuma vāciņu (2B)

2.3 Iepildiet medikamentus rezervuārā, max kapacitāte 10ml


2.4 Aizveriet medikamentu nodalījuma vāciņu (2B)



Brīdinājums

Medikamenti ir nekavējoties jāizsmidzina, nedrīkst atstāt tvertnē medikamentus un/vai to atlikumus.

3 - IERĪCES KONFIGURĀCIJA

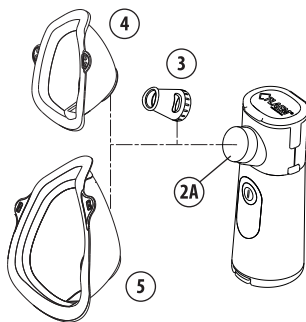

3.1 Maskas vai iemuša uzlikšanas vietā (2A) pievienojiet nepieciešamos piederumus:

*iemuti (3)

*bērnu masku (4)


*pieaugušo masku (5)

Ja izmantojat masku, novietojiet uz sejas to kā parādīts attēlā




4- LIETOŠANA

Pēc ierīces uzstādīšanas, efektīvai terapijai apsēdieties ērtā pozīcijā un sāciet ārstēšanu. LightNeb ir iespējams izvēlēties starp diviem režīmiem: "ON DEMAND" (pēc pieprasījuma) un "CONTINUOUS USE" (nepārtraukts)

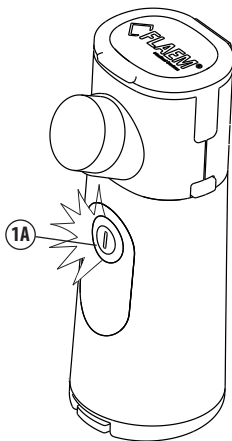


- 4.1 Nospieš un atlaist ieslēgšanas pogu (1A), tā ieslēgsies zilā krāsā un ierīce sāks darboties CONTINUOUS USE režīmā.
- 4.2 Nospieš un atlaist ieslēgšanas pogu (1A) un ierīce tiks izslēgta.
- 4.3 Nospiežot un turot ieslēgšanas pogu (1A) ieelpošanas fāzē un atlaižot to izelpas fāzē, tiek izmantots "ON DEMAND" režīms.
- 4.4 Ielieciet iemuti (3) mutē. Varat izmantot arī bērnu masku (4) vai pieaugušo masku (5).
- 4.5 Lai palielinātu ārstēšanas efektivitāti, elpojiet lēni un dziļi un pēc ieelpas uz brīdi aizturiet elpu, lai ieelpotie medikamenti varētu nogulsnēties uz elpceļiem. Pēc tam lēnām izelpojiet.
- 4.6 Ierīce izslēgsies automātiski:
 - 4.6a pēc 5 minūtēm darbojoties "CONTINUOUS USE" režīmā;
 - 4.6b uzreiz pēc ieslēgšanas pogas atlaišanas "ON DEMAND" režīmā;
 - 4.6c ja medikamentu tvertnē vairs nav šķiduma, pēc zilo LED gaismas diožu mirgošanas;
- 4.7 Ja nevēlaties izmantot ierīci ilgāk nekā 5 minūtes nolieciet to uz līdzenas virsmas kā parādīts attēlā.
- 4.8 Pēc katras lietošanas reizes uzglabāiet ierīci ar piederumiem sausā vietā, sargāt no putekļiem.

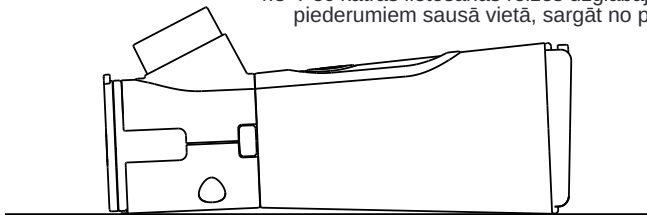

5 - IERĪCES IZJAUKŠANA

5.1 Vienlaicīgi nospiediet 2C pogas, kas atrodas ierīces sānos

5.2 Noņemiet medikamentu tvertni kopā ar mesh ierīci

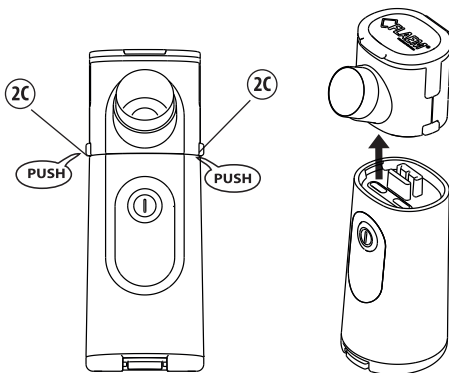


5.3 Rūpīgi notīriet kā aprakstīts TĪRĪŠANA, DEZINFEKCIJAS sadaļā

6 - TĪRĪŠANA, SANITĀRIJA, DEZINFEKCIJA

Pirms un pēc katras lietošanas ierīce un piederumi ir rūpīgi jānotīra un jādezinficē kā aprakstīts zemāk. Ja tas netiek izdarīts, ierīcē var nogulsnēties mikroorganismi, radot infekcijas risku.


Ierīces tīrīšanai NEIZMANTOJIET spirtu vai citus šķīdinātājus,

6.1 TĪRĪŠANA piederumi, medikamentu trauciņš, mesh ierīce:

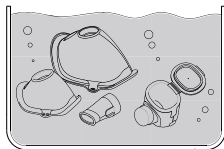

6.1.1 MAZGĀŠANA:


Remdenā, dzeramajā ūdenī nomazgājiet komponentus 2-3-4-5 ar maigu, neabrazīvu trauku mazgāšana līdzekli. Rūpīgi noskalojiet zem tekoša ūdens, lai noskalotu mazgāšanas līdzekļa atlikumus.

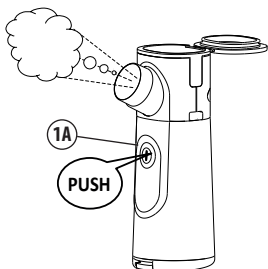


6.1.2 ŽĀVĒŠANA:

6.1.2.a Pēc visu komponentu mazgāšanas un noskalošanas, nokratiet, lai noņemtu lieko ūdeni un salieciet tos kā norādīts nākamajā sadaļā IERĪCES SALIKŠANA ATPAKĀ. Lai izvairītos no ūdens nogulsnešanās medikamentu trauciņā (2), nospiediet pogu 1A un gaidiet, kad ierīce pārtrauks izsmidzināšanu, tad izslēdziet ierīci.

Šī darbība ir ļoti svarīga, lai izvairītos no kaļķakmens nogulsnešanos mesh sieta mikrocaurumiņos. Tas var apdraudēt pareizu izsmidzināšanu turpmākajās lietošanas reizēs.

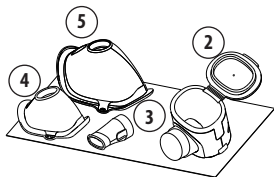

6.1.2.b Lai pabeigtu visu piederumu žāvēšanu, atstājiēt tās brīvi izkārtotas uz salvetes sausā vietā, kā norādīts attēlā.

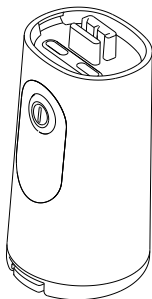


6.2 ierīces pamatnesTĪRĪŠANA

Izmantojiet antibakteriālā līdzeklī viegli samitrinātu drānu, lai notīrītu ierīces pamatni(1). Noslaucīt ar papīra dvieli.



⚠ WARNING

NEIEGŔEMDĒT IERĪCES PĀMATNI (1) ŪDENĪ!
NEMAZGĀT ZEM TEKOŠĀ ŪDENS!

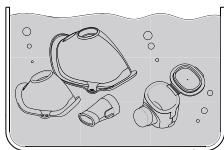

6.3 SANITĀRIJA

6.3.1

Iegrēmdēt medikamentu tvertni un mesh ierīci (2) un piederumus 3-4-5 50% ūdens un 50% baltvīna etiķa šķīdumā uz vismaz 30 sekundēm.


Pēc tam rūpīgi noskalot zem tekoša ūdens.

6.3.2 ŽĀVĒŠANA

skatīt 6.1.2 punktu

6.4 DEZINFEKCIJA

METODE		A	B	C	D
PIEDERUMI, KO DRĪKST DEZINFICĒT		Ierīce žādaļu pudelīšu dezinfekcijai ar tvaiku NE mikroviļņu krāsnī	Vaiššana ar demineralizētu vai destilētu ūdeni	Elektrolītiskais hlorksidētājs	Glutāraldehīda bāzes dezinfektants (Korsolox 4%, 15min)
2 MEDIKAMENTU TVERTNE UN MESH IERĪCE		JĀ Reizi nedēļā max 20 cikli	JĀ Reizi nedēļā max 20 cikli	NĒ	JĀ
3 IEMUTIS		JĀ	JĀ	JĀ	JĀ
4-5 PĪEĀUGUŠO UN BĒRNU MASKA		JĀ	JĀ	JĀ	JĀ

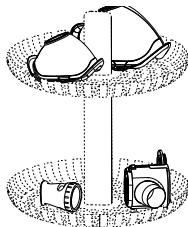


6.4.1 A Metode: Tvaika dezinfekcija

6.4.1.a Dezinficējiet tabulā norādītos piederumus, izmantojot žādaļu pudelīšu dezinfekcijas procedūru (ne mikroviļņu krāsnī), apstrādes laiks vismaz 15 minūtes. Izmantojiet demineralizētu vai destilētu ūdeni, lai izvairītos no kaļķakmens nogulsniem uz izsmidzināšanas galviņas.

Rūpīgi izlasiet lietošanas ierīces instrukciju, pievēršot uzmanību nepieciešamajam ūdens daudzumam un dezinfekcijas metodei.

6.4.2 B Metode: dezinfekcija, izmantojot vāršanu

6.4.2.a Dezinficējiet tabulā norādītos piederumus, vārot tos 10 minūtes; izmantojiet demineralizētu vai destilētu ūdeni, lai izvairītos no kaļķakmens nogulsņiem uz izsmidzināšanas galvņas.

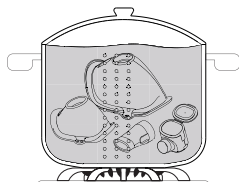


Pirms nākamās lietošanas, nogaidiet, kad piederumi ir atdzisuši un nožuvuši.

6.4.3 C Metode: Ķīmiskā dezinfekcija

6.4.3.a Izmantojiet glutāraldehīdu bāzes dezinfektantu: iegremdējiet medikamentu tvertni (2) un piederumus (3-4-5) šķīdumā, sekojot dezinfekcijas līdzekļa ražotāja norādījumiem par izturēšanas laiku.

Alternatīvi:

6.4.3.b Izmantojiet dezinfekcijas līdzekli ar elektroīlisku hlora oksidētāju (aktīvā viela nātrija hipohlorīts): iegremdējiet piederumus 3-4-5 šķīdumā, ievērojot ražotāja norādījumus.

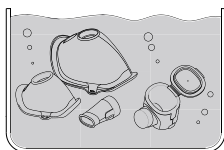

⚠ WARNING

IZŅEMOT MEDIKAMENTU TVERTNI UN MESH IERĪCI (2)

6.4.3.c

Atsēdējiet piederumus iegremdētus dezinfekcijas līdzekļa ražotāja norādīto laiku un norādītajā koncentrācijā



6.4.3.d


Izņemiet piederumus un noskalojiet tos zem liela daudzuma tekoša dzeramā ūdens.

6.4.3.e ŽĀVĒŠANA:


Rūpīgi veiciet darbības, kas aprakstītas 6.1.2. lietotāja rokasgrāmatas sadaļā

6.4.3.f

Izrīciniet dezinfekcijas līdzekli saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

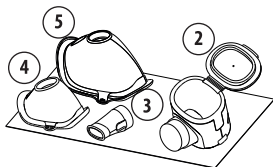


7 - IERĪCES SALIKŠANA DARBA KARTĪBĀ

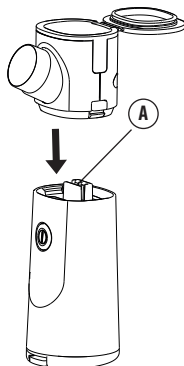


- 7.1** Ievietojiet medikamentu tvertni un mesh ierīci (2) ierīces pamatnē (1), sekojot instrukcijai (A).

Pārliecinieties, ka piederumu "kāja" atrodas tajā pašā pusē, kur poga.

- 7.2** Spiediet līdz abas daļas pilnībā nofiksējas.

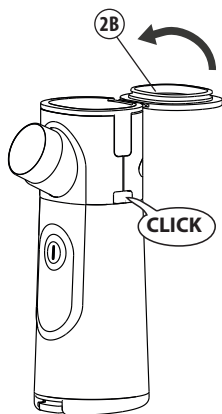

- 7.3** Aizveriet medikamentu tvertnes vāciņu (2B).

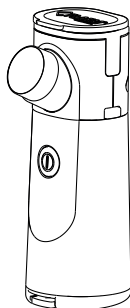

TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

PROBLĒMA	IEMESLS	RISINĀJUMS
Ierīce ieslēdzas, bet bet neveidojas aerosols vai tas ir sliktas kvalitātes.	Medikamentu tvertnes vai mesh sieta traucējumi	Iegremdējiet medikamentu tvertni un mesh ierīci (2) 50% ūdens un 50% baltvīna etiķa šķīdumā, noskalojiet un salieciet atpakaļ kā norādīts 6.3. sadaļā SANITĀRIJA
	Nav šķiduma piegādes	Pārbaudiet vai mazais caurums medikamentu tvertnes vidū nav pārklāts, ja tā ir, tad notīriet to.
	- Izsmidzināšanas ātrums atkarīgs no izmantotajiem medikamentiem - Šķidrums uz mesh sieta	- Inhalāciju laiks atkarīgs no medikamentu veida un pacienta ieelpošanas spējam. - Sēdiet taisni, kad nebulaizērs ir pagriezts slīpi, medikamenti nenonāk mesh sieta. - Noslaukiet uzmanīgi ar vates kociņu no mesh sieta vai nokratiet pilienu
Zilās LED diodes mirgo un ierīces izslēdzas pēc dažām sekundēm. Ierīces izslēdzas.	- Nav medikamentu tvertnē - Kopš ieslēgšanas, pagājušas 5 minūtes	- Pārbaudiet vai medikamentu tvertnē (2) ir šķidrums - Ieslēdziet atkal ierīci
Poga (1A) mirgo sarkana un ierīce neveido aerosolu vai izslēdzas.	Izlādējusies vai vāja baterija	- Nomainiet baterijas (6), ja tās ir sārmas - Nomainiet baterijas, ja tās ir atkārtoti uzlādējamās Ni-MH vai litija
Ierīci nevar ieslēgt	Problēma ar elektrības padevi	- Pārliedzieties, ka baterijas ir ievietotas pareizi, ar pareizu polaritāti - Nolietotas vai izlādējušās baterijas. Nomainiet vai uzlādējiet tās.

Ja pēc iepriekšminēto nosādījumu pārbaudes, ierīce joprojām nesmidzina aerosolu, rekomendējam sazināties ar izplatītāju vai autorizētu Flaem servisa centru.

8 - TEHNISKIE PARAMETRI

Electronisks nebulaizers LightNeb P0318EM

Barošana	2.4 - 3Vdc 1.5W 2 x AA sārmu vai lādējamās baterijas
Jauda	1,5W
Pārveidotāja frekvence	108 KHz +/- 3KHz
Skaņas līmenis (1 m)	40 dBA aptuveni
Ierīces izmēri	5.0(L) X 6.2(W) X 13.7(H) cm
Svars (izņemot baterijas)	115g

Inhalāciju ilgums ml/min(1)	≥ 0.30 ml
MMAD (2)	3.7 ÷ 4.6 μm
Aerosols < 5 μm (FPF) (2)	65% aptuveni
Medikamentu tvertne	10 ml

(1)Izsmidzināšanas ātrums tika mērīts ar 0,9% sāls šķīdumu 23 ° C temperatūrā saskaņā ar Flaem iekšējo procedūru I29-P07.5.

Tas var atšķirties atkarībā no piegādātās smidzināšanas galviņas, zāles un vides apstākļiem.

Piegādes ātruma vērtības var atšķirties arī atkarībā no pacienta elpošanas kapacitātes.

(2)In vitro raksturojumu veica TÜV Rheinland Italia S.r.l. sadarbībā ar Parmas Universitāti un saskaņā ar Eiropas standartu aerosola terapijas iekārtām EN 13544-1:2007 + A1. Skatīt informācija ir pieejama pēc pieprasījuma.

PIELIETOJAMĀS DAĻAS

BF tipa pielietojamās daļas: piederumi (3,4,5)

9 - DARBĪBAS NOSACĪJUMI

Temperatūra	min 10°C~ max 40° C
Gaisa mitrums	min 10%~ max 75% RH
Lietošana/uzglabāšana	min. 690 hPa~ max. 1060 hPa

Piezīme: īsu laiku un ar ievietotām baterijām ierīci var uzglabāt un transportēt iepriekš minētajās temperatūrās.

10 - TRANSPORTĒŠANAS UN UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Temperatūra	min -10°C~ max 35°C
Gaisa mitrums	min 10%~ max 75% RH
Lietošana/uzglabāšana	min. 690 hPa~ max. 1060 hPa

Piezīme: ilgāku laiku un labākai bateriju uzglabāšanai izņemiet baterijas no ierīces un glabājiet tās vietā, kur tiek uzturēta iepriekš minētā temperatūra.

Ja ierīce tiek uzglabāta temperatūrā, kas atšķiras no uzglabāšanas temperatūras, atstājiet ierīci istabas temperatūrā vismaz 1 stundu pirms lietošanas.

Ja zāles ir suspensētas vai īpaši viskozas, informācija, kas sniegta saskaņā ar standartu EN13544-1, var tikt mainīta.

Temperatūra, atmosfēras spiediens un mitrums var ietekmēt ierīces darbību sniegumu.

11 - SIMBOLI



Pozitīva bateriju polaritāte
Negatīva bateriju polaritāte



BF tipa pielietojamās daļas



BRĪDINĀJUMS!
Lasīt lietošanas instrukciju



Līdzstrāva



CE markējums
saskaņā ar Medicīnas
ierīču Direktīvu 93/42/EEK



Min un Max telpas
temperatūra



Min un Max atmosfēras
spiediens



Bateriju izmešana: izlietotās
baterijas ir jāzmet attiecīgajos
atkritumu konteineros.



Ražotājs

IP21

Korpusa aizsardzības pakāpe:
Aizsargāts pret cietiem svešķermeņiem,
kas lielāki par 12mm. Aizsargāts pret
piekļuvi ar pirkstu; Aizsargāts no
piloša ūdens.



Ierīces sērijas numurs



Brīdinājums



Min un Max gaisa mitrums

12 - IERĪCES IZNĪCINĀŠANA



Saskaņā ar Direktīvu 2012/19/EK uz ierīces uzdrukātais simbols norāda, ka ierīce, no kuras jāatbrīvojas, ir uzskatāma par atkritumiem un tāpēc tai ir jābūt "dalītas savākšanas" vienībai. Līdz ar to lietotājam šie atkritumi ir jānogādā vietējās varas ierīkotās savākšanas vietās vai jānodod mazumtirgotājam, pērkot līdzvērtīgu jaunu ierīci. Atkritumu dalīta savākšana un tai sekojošās apstrādes, otrreizējās pārstrādes un likvidēšanas procedūras veicina tādu ierīču ražošanu, kas izgatavotas no otrreizējās pārstrādes materiāliem un ierobežo radīto negatīvo ietekmi uz vidi un veselību. Ja lietotājs izmet izstrādājumu kādā neatļautā veidā piemēro administratīvos sodus saskaņā ar Direktīvas 2012/19/EK tiesību aktiem dalībvalstī vai valstī, kurā produkts tiek izmests.



13- IEPAKOJUMA IZNĪCINĀŠANA



Produkta kaste



ermosarūkoša akumulatora plēve



Produkta iepakojums



Termosarūkoša piederumu plēve

14 - ELEKTROMAGNĒTISKĀ SADERĪBA

Šī ierīce tika izstrādāta, lai atbilstu pašreizējām elektromagnētiskajām prasībām saderība (EN 60 601-1-2). Elektromedicīnas ierīcēm uzstādīšanas un lietošanas laikā ir nepieciešama īpaša piesardzība saistībā ar EMC prasībām. Tādēļ lietotājiem šīs ierīces ir jāinstalē un/vai jāizmanto saskaņā ar ražotāja specifikācijām. Iespējami elektromagnētiski traucējumi ar citām ierīcēm. RF mobilās vai pārnēsājamās radio un telekomunikāciju ierīces (mobīlie telefoni vai bezvadu savienojumi) var traucēt elektromedicīnisko ierīču darbību. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni www.flaem.it. Medicīniskā ierīce var tikt pakļauta elektromagnētiskiem traucējumiem, ja noteiktai diagnostikai vai ārstēšanai tiek izmantotas citas ierīces. Flaem patur tiesības veikt tehniskas un funkcionālas izmaiņas izstrādājumā bez iepriekšēja brīdinājuma.

15 - PAREDZAMĀIS KALPOŠANAS LAIKS

Tālāk norādītais dažādu komponentu kalpošanas laiks attiecas uz ierīces lietošanu aptuveni 10 minūtes dienā (2 reizes pa 5 minūtēm).

IERĪCE - 5 gadi

MASKAS UN IEMUTIS - 1 gads

MEDIKAMENTU TVERTNE UN MESH SIETS - 1 gads

REZERVES DAĻU UN PIEDERUMU PIEEJAMĪBA



Iemutis (silicone)

ACO563P



Pediatriskā maska

(Soft-touch white)

ACO729P



Pieaugušo maska

(Soft-touch white)

ACO730P



Medikamentu tvertne un mesh siets/ierīce

ACO001C

[illegible]

WARRANTY

EN> The warranty will be provided by the local retailer in accordance with the applicable laws.



FLAEM NUOVA S.p.A.
Via Colli Storici, 221
25015 S. MARTINO DELLA BATTAGLIA (Brescia) – ITALY
Tel. +39 030 9910168 r.a. / Fax +39 030 9910287
www.flaem.it

© 2021 FLAEM NUOVA® All rights reserved
Cod. 19033-0 rev. date 11/2021