

INSTRUKCIJA RATIŅKRĒSLAM - LINE



Saturs

- 1.- Svarīgi
- 2.- Lietotās ikonas marķējumā un instrukcijā
- 3.- Paredzētā lietošana
- 4.- Produkta apraksts
- 5.- Brīdinājumi un drošība
- 6.- Salikšana un lietošana
- 7.- Tehniskā specifikācija
- 8.- Kopšana un apkope
- 9.- Produkta pārstrāde
- 10.- Produkta uzglabāšana
- 11.- Paredzamais kalpošanas laiks
- 12.- Garantijas nosacījumi un serviss
- 13.- Veiktā testēšana un izmēģinājumi
- 14.- Ražotājs

1.- Svarīgi

Pirms šī izstrādājuma lietošanas uzmanīgi izlasiet rokasgrāmatu un nepieciešamības gadījumā saglabāiet to.

Ja nevarat izlasīt vai saprast kādu brīdinājumu, piezīmi vai instrukciju, pirms produkta lietošanas sazinieties ar pārdevēju, pretējā gadījumā varat tikt nodarīts kaitējums.

Pirms lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai ortopēdu.

2.- Lietotās ikonas marķējumā un instrukcijā

	Ražotājs		Ražošanas datums
	Medicīnas ierīce		Ievērojiet drošības norādījumus
	Maksimālais lietotāja svars kg		Atbilstības deklarācija
	Uzmanību, iesprūšanas draudi		Pārbaudiet instrukcijā
	Informācija par produkta pārstrādi		Pārstrāde
SN	Produkta sērijas numurs	LOT	Produkta partijas numurs
REF	Produkta reference vai kods		

3.- Paredzētā lietošana

Ratiņkrēsls ir palīgīdzeklis, kas ļauj cilvēkiem brīvi pārvietoties, sēžot, neizmantojot apakšējās ekstremitātes.

4.- Produkta apraksts



Pieejamie modeļi

Modelis	Apraksts
---------	----------

Line R600	Viegls manuālais ratiņkrēsls izgatavots no alumīnija ar fiksētu atzveltni. 600 mm aizmugurējie riteņi
Line R300	Viegls manuālais ratiņkrēsls izgatavots no alumīnija ar fiksētu atzveltni. 300 mm aizmugurējie riteņi
Line Giro	Viegls manuālais ratiņkrēsls izgatavots no alumīnija ar fiksētu atzveltni. 600 mm aizmugurējie riteņi un Giro sistēma
Line Duo	Viegls manuālais ratiņkrēsls izgatavots no alumīnija ar fiksētu atzveltni. 600 mm aizmugurējie riteņi un Duo sistēma
Line Plus	Viegls manuālais ratiņkrēsls no alumīnija ar dalītu atzveltni. 600 mm aizmugurējie riteņi ar noņemamām asīm (ātrā atlaišana). Ietver pavadošās bremzes
Sport Line	Aktīvs manuālais ratiņkrēsls, viegls, izgatavots no alumīnija ar zemu atzveltni. 600 mm pneimatiskie (piepūšamie) aizmugurējie riteņi ar noņemamām asīm (ātrā atlaišana)
Pediatric Line	Bērnu ratiņkrēsls, viegls manuālais ratiņkrēsls izgatavots no alumīnija ar fiksētu atzveltni. 550 mm aizmugurējie riteņi ar izvelkamām asīm (ātrā atlaišana)

5.- Brīdinājumi un drošība



Šo drošības pasākumu neievērošana var izraisīt nopietnus savainojumus.

- Nepārsniedz maksimālo lietotāja svara ierobežojumu 140kg.
- Pirms lietošanas ievērojiet locīšanas un montāžas instrukcijas un pārliecinieties, ka visas krēsla daļas ir droši nostiprinātas. Lietojot un ceļojot, jums jābūt ļoti uzmanīgiem.
- Izvairieties no ķermeņa pārmērīgas sasvēršanas, kā rezultātā ratiņkrēsls var zaudēt līdzsvaru, izvairieties no pēkšņiem paātrinājumiem un bremzēšanas, kā arī nebrauciet ātri, lai ratiņkrēsls paliktu stabils.
- Samaziniet ātrumu, ja tas atbilst apstākļiem (šķēršļi, slapjas virsmas, stiprs vējš, šauras vietas utt.).
- Īpaša piesardzība ir nepieciešama, šķērsojot rampas, apmales un citas virsmas, kas izraisa līmeņa izmaiņas. Rampām jābūt pietiekami platām, lai nodrošinātu drošu pāreju. Nebrauciet pa nogāzi, kas ir stāvāka par 12°, jo tas var būt bīstami. Slīpuma virsmai jābūt stingrai un neslīdošai. Jūs varat braukt augšup un lejup pa apmalēm ar kāda cita palīdzību.
 - Kāpnēs ir nepārvarams un bīstams šķērslis ratiņkrēsla lietotājiem. Ja nav alternatīvu ceļu uz kāpnēm, piemēram, rampas, lifti vai platformu lifti, pārvietojieties pa kāpnēm ar vienu vai vairāku citu cilvēku palīdzību. Viņiem jātur krēsls aiz tā fiksētajām, nenņemamajām daļām.
- Minimālie izmēri ratiņkrēslā lietojamiem pacēlājiem ir:
 - Izmantojamais dziļums > 1200 mm - Izmantojamais platums > 900 mm - Attālums starp durvīm > 800 mm - Virsmas laukums > 1,5 m²
- Ratiņkrēslā ir grūti pārvietoties pa nelīdzenām virsmām, piemēram, salauztu ceļa virsmu, granti, zāli, smiltīm, dubļiem vai segumu, un tas var pat izraisīt kritienus.
- Drošības apsvērumu dēļ, veicot jebkādu pārsēšanos ratiņkrēslā, izmantojiet stāvbremzes.
- Nekariet neko uz krēsla atzveltnes vai rokturiem, kas var izraisīt krēsla apgāšanos.
- Pēc krēsla regulēšanas iesakām pārbaudīt visas krēsla skrūves. Ir normāli, ka tikai no ikdienas lietošanas skrūves un uzgriežņi var kļūt vaļīgi. Ja tā notiek, sazinieties ar savu izplatītāju.
- Bremzes ir paredzētas lietošanai kā stāvbremzes, nevis lai palēninātu vai apturētu krēslu kustībā. Forta neuzņemamas atbildību par nepareizas lietošanas sekām.
- Visas noņemamās sastāvdaļas ir jāsamontē uzmanīgi, lai izvairītos no traumām vai ratiņkrēsla bojājumiem.
- Pirms lietošanas pārliecinieties, vai ratiņkrēsls ir pilnībā atlocīts un noņemamās sastāvdaļas ir nostiprinātas un pareizi novietotas.
- Lai brauktu augšup vai lejup pa kapnēm, ietvi, utt., ratiņkrēslam jābūt pilnībā atvērtam un kājām uz pēdām uz kāju balstiem.
- Ratiņkrēsls nav piemērots lietošanai kā sēdekļis mehāniskajā transportlīdzeklī.
- Ratiņkrēsliem ar pneimatiskajām riepām regulāri jāpārbauda spiediens riepās. Mēs iesakām pārbaudīt katru nedēļu.
- Pirms ratiņkrēsla lietošanas pārliecinieties, vai visas detaļas ir droši nostiprinātas un labā darba kārtībā.

Nomainiet visas ratiņkrēsli sastāvdaļas, kas ir nolietotas vai bojātas.

Pirms ratiņkrēsli lietošanas pārbaudiet riteņu stāvbremzes. Kad riteņi ir bloķēti, bremžu lokiem ir jāapstādina riteņu griešanos. Kad stāvbremzes ir atlaistas, riteņiem jāspēj brīvi griezties. Izmantojiet tikai Forta piegādātos piederumus un detaļas.

Lietošanas laikā neregulējiet ratiņkrēsli.

Neizmantojiet ratiņkrēsli uz slapjas, apledojušas vai sniegotas nogāzes.

Uzturiet ratiņkrēsli tīru un labā lietošanas kārtībā.

Visi ratiņkrēsli satur vai var saturēt plastmasas detaļas, kuras sadedzinot var radīt toksiskas gāzes. Nepakļaujiet ratiņkrēsli vai kādu no tā sastāvdaļām spēcīgam karstumam, kas var izraisīt to vai to aizdegšanos.

Baseina ūdens, smiltis un jūras ūdens satur hloru un citas ķīmiskas vielas, kas sabojā ratiņkrēsli, iekšējos gultņus un stiprinājumus. Ja ratiņkrēsls ir pakļauts kādam no šiem apdraudējumiem, neaizsargātās detaļas jāieeļļo ar eļļu un vazelīnu (izsmidzināmu), un ratiņkrēsls ir jānomazgā.

▫ Mēs iesakām regulāri pārbaudīt vai skrūves ir pievilktas, jo ikdienas lietošanas laikā tās var kļūt vaļīgas.

Drošības pasākumi konkrētiem modeļiem:

LINE DUO

- 250mm riteņus izmantojiet tikai iekšējās, īsām distancēm un šaurām ejām.
- Lietojot Duo sistēmu, esiet uzmanīgi, lai apgērbs vai ķermeņa daļas netiktu iespiestas.

LINE GIRO

- Ņemot lielos 600 mm riteņus, pārliecinieties, ka ass ir pilnībā bloķēta un ievietota korpusā.
- Grozāmos riteņus izmantojiet tikai īsām distancēm un šaurām ejām.
- Lai uzbrauktu apmalēm, izmantojiet 600mm riteņus.
- Lietojot Giro sistēmu, esiet uzmanīgi, lai apgērbs vai ķermeņa daļas netiktu iespiestas.
- **Darbības no kā nepieciešams izvairīties:**
- Neizmantojiet ratiņkrēsli ar vienu mazu un vienu lielu riteni, lai pārvadātu cilvēku, vienmēr izmantojiet divus vienāda izmēra riteņus aizmugurē.
- Nevediet personu tikai ar GIRO KIT riteņiem.
- Neizmantojiet GIRO KIT kā pedāli, lai paceltu priekšējos riteņus vai uzbrauktu apmalēm.
- Neizmantojiet GIRO KIT ārtelpās, piemēram, dārzos, parkos, uz ietvēm.
- Neizmantojiet GIRO KIT uz apmalēm, nelīdzenas vai nestabilas zemes, piemēram, smiltīm, dubļiem
- utt. Nekādā gadījumā nebojājiet un nepārveidojiet GIRO KIT komponentus.

LINE TERMINAL

- Nepārsniedziet maksimālo bagāžas nodalījuma (5 kg) un/vai bagāžas turētāja (15 kg) slodzi. Kravas drīkst pārvadāt tikai tam paredzētajās ratiņkrēsli daļās.

6.- Salikšana un lietošana

Montāža un salocīšana

Ratiņkrēslam pirms lietošanas nav nepieciešama montāža, izņemot kāju balsti, kas nav piestiprināti piegādājot. Kāju un roku balstu montāžai nav nepieciešami nekādi instrumenti.

1. Kāju balsti tiek uzstādīti, novietojot tos uz rāmja vadotnēm, nospiežot uz ratiņkrēsli ārpusi un bīdot balstus, līdz tie ir vajadzīgajā augstumā. Atlaidiet slēdzeni, un kāju balsts paliks fiksētā stāvoklī. Kāju balstu var arī pagriezt uz iekšu vai uz āru, pavelkot to līdz vadotnes augšdaļai.
2. Lai piestiprinātu roku balstus, vienkārši novietojiet tos uz vadotnēm un viegli spiediet uz leju, lai tie nofiksētos vietā.
3. Lai noņemtu roku balstus, rīkojieties pretējā virzienā. Pirms velciet uz augšu, nospiediet atbloķēšanas sviru.



Lai salocītu ratiņkrēslu, jārikojas šādi:

1. Lai salocītu ratiņkrēslu, pavelciet sēdekļa audumu vai caurules, kas to notur.
2. Lai atlocītu ratiņkrēslu, nolaidiet sēdekļa caurules, līdz tās iekļaujas vadotnēs,



Pielāgošana lietotājam

Lietotājam jāņem vērā trīs svarīgas lietas, izvēloties vieglu manuālo ratiņkrēslu.

Pirmkārt, paredzētā lietotāja augumam un svaram, t.i., ratiņkrēslam vienmēr ir jāatbilst tā lietotājam. Otrkārt, skaidri norādiet, ko darīsiet ratiņkrēslā (pārvietošana, locīšana utt.). Visbeidzot, kāda ir vide, kurā tiks izmantots ratiņkrēsls.

Tabulā sniegti ieteikumi, kas jāņem vērā, izvēloties ratiņkrēslu, lai tas atbilstu konkrēta lietotāja vajadzībām:

LIETOTĀJA MĒRĪJUMI	SAISTĪTS AR	RATIŅKRĒSLA MĒRĪJUMI
Roku garums	Stumšanas disku sasniedzamība	Leņķis starp roku un apakšdelmu 120°, turot pie stumšanas diska
Augstums no galvas līdz grīdai	Redzes attālums	
Augstums elkoņi-grīda	Roku balsta augstums	20mm virs elkoņa ar izstieptām rokām
Ceļu augstums	Attālums no kāju balsta līdz sēdeklim	Kāju balsta augstums 100-130mm
Attālums sēžamvieta-buttock-ceļa aizmugure	Attālums kāju balsts-sēdekļis	Sēdekļa atstarpe 25mm starp augšstilbiem un roku balsta sāniem
Kāju garums	Sēdekļa dziļums	30-50mm starp sēdekli un ceļa aizmugurējo daļu
Gurnu platums	Sēdekļa platums	25mm atstarpe starp augšstilbiem un roku balsta sāniem
Ceļa leņķis	Sēdekļa un kāju balsta slīpums	Sēdekļa slīpums 1-4° uz aizmuguri
Attālums paduse-gurni (platākā gurnu daļa)	Atzveltnes augstums	Atzveltnē 25 mm zem lāpstiņas
Aptuvenais svars	Ratiņkrēsla izturība	Lietotāja maksimālais svars 140 kg


Ratiņkrēsla lietošana

Šajā sadaļā sniegti pamata ieteikumi par ratiņkrēsla lietošanu personai, kas to izmanto, un jebkuram pavadonim:

- Pirms ratiņkrēsla lietošanas pārliecinieties, ka tas ir pareizi pozicionēts un visas tā daļas ir atlocītas droši nostiprinātas.
- Lai aizsniegtu un paceltu kādu priekšmetu, pavērsiet priekšējos ritentiņus pret objektu. Pirms pārvietošanas ķermeni, lai sasniegtu objektu, iedarbiniet stāvbremzes, lai ratiņkrēsls būtu stabils.
- Ratiņkrēsls ir jāveda vai jāpārvieto droši un efektīvi. Sēdeklim jābūt iestatītam tādā augstumā, lai lietotājs varētu satvert stumšanas disku ar leņķi starp roku un apakšdelmu aptuveni 120°. Atzveltnē jābūt nedaudz noliekta uz aizmuguri.
- Ir svarīgi saglabāt vienmērīgu tempu, lai pēc iespējas samazinātu nogurumu. Ja vēlaties iet ātrāk, katru grūdienu vajadzētu padarīt īsāku un stumšanu ar lielāku biežumu, paturot prātā, ka īsie grūdieni palielina stabilitāti un garie sitieni dod lielāku impulsu.
- Ātrumu iesakām samazināt, turot pie stumšanas diskām un pakāpeniski samazinot ātrumu līdz ratiņkrēsls apstājas. Stāvbremzes nedrīkst izmantot bremzēšanai kustībā, tas var būt bīstami.
- Lai pagrieztos, ar vienu roku satveriet stumšanas disku un stumiet to atpakaļ, ar otru roku stumiet otru disku uz priekšu. Jo tālāk katra roka virzās, jo asāks pagrieziens.
- Tukšu ratiņkrēslu var transportēt gan ar transportlīdzekli, gan avio.

Giro sistēmas lietošana

1. GIRO KIT atbloķēšanas gredzens
2. GIRO KIT Bremzes
3. GIRO KIT ritenis

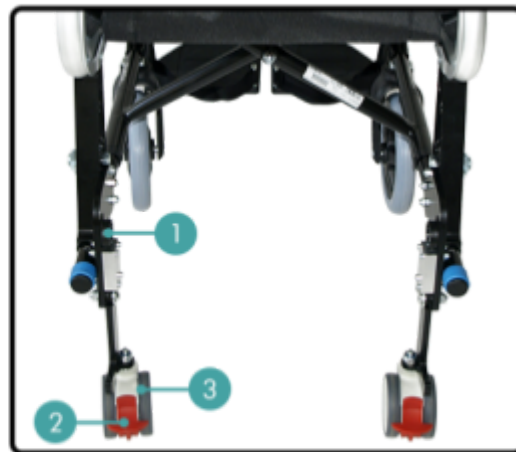

- 600 mm riteniem balstoties uz zemi, pavelciet gredzenu, un KIT GIRO 75 mm ritenis nokritīs no horizontālā stāvokļa un balstīsies uz zemi. Ja nepieciešams, spiediet ar kāju uz atbalsta plāksnes, kas paredzēta šim nolūkam, lai pabeigtu pagriezienu, un atstājat riteni vertikāli, kā nepieciešams lietošanai. To pašu atkārtojiet ar otru riteni.
- Pārbaudiet, vai esat nevainojami nofiksējis sprūdratu, un izmantojiet ratiņkrēslu ar mazajiem riteņiem uz zemes un lielajiem riteņiem piepaceltiem no zemes. Noņemiet lielos riteņus tikai pēc tam, kad esat pārbaudījis, vai sprūdrats ir pilnībā nobloķēts. Tas nozīmē, ka ratiņkrēslam tagad ir mazāks pagriezienu loks.
- Lai atgrieztos pie 600 mm riteņu lietošanas, rīkojieties šādi: piestipriniet 600 mm riteņus, ja tie ir noņemti. Tie joprojām būs piepacelti no zemes. Paceliet ratiņkrēslu no roktura, lai palīdzētu atbloķēt sprūdratu un pavelciet gredzenu. Pavelciet GIRO KIT atpakaļ horizontālā stāvoklī.
- Kad GIRO KIT netiek lietots, tas horizontālā stāvoklī var būt vērsts atpakaļ vai uz priekšu.
- Lai redzētu kā darbojas sistēma, iesakām noskatīties video: <https://www.fortasl.es/en/wheelchairs/standard/line-giro.php>
- GIRO KIT var izmantot tikai iekštelpās nelielos attālumos, lai izbrauktu vai manevrētu šaurās vietās, piemēram, šaurās durvju ailēs, vannas istabās, liftos utt.
- Bremzes jāiedarbina, kad persona nav ratiņkrēslā bez 600mm riteņiem.

Duo sistēmas lietošanai

TDuo Line modelis ir aprīkots ar 600 mm 250 mm aizmugurējiem Riteņiem. .

1. Duo riteņi ārpusē
2. Duo riteņi iekšpusē



Tranzīta bremzes Duo sistēmai ir pieejamas kā papildpiederums. Tranzīta bremzes ļauj bloķēt 250 mm riteņus, lai apturētu ratiņkrēsla kustību, kad tiek izmantoti 250 mm riteņi. Aktivizējiet bremzes, lai apturētu ratiņkrēsla kustību neatkarīgi no tā, vai 250 mm riteņi atrodas ārpusē vai iekšpusē.

Līdz pusei salocītas atzvetnes izmantošana

1. Lai atlocītu atzveltni (lai to novietotu vertikāli), nospiediet katra mehānisma pogu un velciet rokturus uz augšu un uz priekšu, līdz tie atrodas vēlamajā pozīcijā. Atlaidiet pogas, un atzveltnē tiks nofiksēta.
2. Lai nolocītu atzveltni, stāviet aiz ratiņkrēsla, nospiediet pogas katrā atzveltnes sānu ārpusē un nospiediet rokturus uz leju.



Aizmugures bremžu izmantošana

Aizmugures bremzes ļauj pavadonim ērti apstādināt ratiņkrēslu

Brīdinājums Bremzes drīkst uzstādīt tikai Fortas pilvarots pārstāvis

Nospiediet bremžu rokturi katrā pusē, lai bremzētu kustību. Lai nofiksētu bremzes, Nospiediet sarkano slēdzīti.



7.- Tehniskā specifikācija

Konkrētie izmēri katram ratiņkrēslu klāsta modelim ir norādīti zemāk. Visi mērījumi ir milimetros (mm), izņemot svaru, kas ir kilogramos (kg). Mērvienības nav parādītas tabulā lasīšanas ērtībai un vietas trūkumam.

- Mērījumu pielāgšana šajā instrukcijā norādītajiem izmēriem: ±10 mm
- Svara pielāgšana: ±0.5 kg
- Slīpuma pielāgšana: ± 2 °
- Sēdekļa slīpums: 3°
- Atzveltnes slīpums: 93°
- Maksimālais lietotāja svars: 140 kg
- Sēdekļa materiāls: Polyester/Nylon

Konkrētie izmēri katram ratiņkrēslu klāsta modelim ir norādīti zemāk. Visi mērījumi ir milimetros (mm), izņemot svaru, kas ir kilogramos (kg). Mērvienības nav parādītas tabulā lasīšanas ērtībai un vietas trūkumam.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Augstums	Garums	Sēdekļa augstums	Sēdekļa dziļums	Aizmugurējā riteņu diametrs	Priekšējā riteņu diametrs	Garums bez kāju balstiem	Platums	Atzveltnes augstums (auduma daļa)	Sēdekļa platums

K Svars

Line R600						
Izmērs	38	41	45	48	52	56
A	915	915	915	915	915	915
B	1070	1070	1070	1070	1070	1070
C	510	510	510	510	510	510
D	410	410	410	410	410	410
E	600	600	600	600	600	600
F	200	200	200	200	200	200
G	810	810	810	810	810	810
H	560	590	630	660	700	740
I	400	400	400	400	400	400
J	360	380	430	460	500	540
K	13,21	13,28	13,35	13,42	14,46	14,53

Line R300

Izmērs	38	41	45	48	52	56
A	915	915	915	915	915	915
B	980	980	980	980	980	980
C	510	510	510	510	510	510
D	410	410	410	410	410	410
E	300	300	300	300	300	300
F	200	200	200	200	200	200
G	680	680	680	680	680	680
H	540	570	610	640	680	720
I	400	400	400	400	400	400
J	360	380	430	460	500	540
K	11,84	11,90	11,96	12,02	13,05	13,11
Line Giro						
Izmērs	38	41	45	48	52	56
A	915	915	915	915	915	915
B	1070	1070	1070	1070	1070	1070
C	510	510	510	510	510	510
D	410	410	410	410	410	410
E	600	600	600	600	600	600
F	200	200	200	200	200	200
G	810	810	810	810	810	810
H	560	590	630	660	700	740
I	400	400	400	400	400	400
J	360	380	430	460	500	540
K	15,49	15,56	15,63	15,70	16,74	16,81
Line Duo						
Izmērs	38	41	45	48	52	56
A	915	915	915	915	915	915
B	1070	1070	1070	1070	1070	1070
C	510	510	510	510	510	510
D	410	410	410	410	410	410
E	600	600	600	600	600	600
F	200	200	200	200	200	200
G	810	810	810	810	810	810
H	560	590	630	660	700	740
I	400	400	400	400	400	400
J	360	380	430	460	500	540
K	15,98	16,05	16,12	16,19	17,23	17,30
Line Pluss						
Izmērs	38	41	45	48	52	56
A	915	915	915	915	915	915
B	1070	1070	1070	1070	1070	1070
C	510	510	510	510	510	510
D	410	410	410	410	410	410
E	600	600	600	600	600	600
F	200	200	200	200	200	200
G	810	810	810	810	810	810

H	560	590	630	660	700	740
I	400	400	400	400	400	400
J	360	380	430	460	500	540
K	13,21	13,28	13,35	13,42	14,46	14,53
Sport Line						
izmērs	38	41	45	48	52	56
A	770	770	770	770	770	770
B	930	930	930	930	930	930
C	510	510	510	510	510	510
D	410	410	410	410	410	410
E	600	600	600	600	600	600
F	150	150	150	150	150	150
G	720	720	720	720	720	720
H	560	590	630	660	700	740
I	320	320	320	320	320	320
J	360	380	430	460	500	540
K	12,90	12,97	13,04	13,11	14,15	14,22
Pediatric Line						
Izmērs	36	38	41	45		
A	890	890	890	890		
B	920	920	920	920		
C	460	460	460	460		
D	380	380	380	380		
E	550	550	550	550		
F	150	150	150	150		
G	750	750	750	750		
H	530	550	580	620		
I	400	400	400	400		
J	340	360	390	430		
K	12,36	12,43	12,50	12,57		

8.- Kopšana un apkope



Ja produkts netiek kopts un uzturēts ideālā stāvoklī, pastāv negadījuma risks.

Regulāra profilaktiskā apkope ļauj uzturēt ratiņkrēslu optimālā darba stāvoklī un atklāt un atrisināt nelielas problēmas, kas laika gaitā var izvērsties par lielām kļūmēm. Tas ne tikai uzlabo ikdienas drošību, bet arī ietaupa laiku un naudu ilgtermiņā.

Piezīme: Bojājumu gadījumā jebkurš remonts ir jāveic autorizētam speciālistam.

Vispārīgi ieteikumi

Tālāk ir aprakstītas dažas no visbiežāk veiktajām ratiņkrēsla apkopes un kopšanas darbībām:

- Turot ratiņkrēslu tīru un ideālā stāvoklī, tas uzlabos tā veiktspēju un izskatu.
- Mēs iesakām izmantot velosipēdu tīrīšanas un apkopes līdzekļus, piemēram, smēreļļas, aerosola baloniņus, mitras drānas utt.
- Ja krēsls ir bijis pakļauts ūdens iedarbībai no lietus, dušas utt., iesakām to nosusināt ar drānu. Izsmidziniet nedaudz velosipēda eļļas uz auduma un uzklājiet to uz savienojumiem un asīm.
- Lai mazgātu audumus, izmantojiet neitrālas ziepes ar maksimālo temperatūru 30°C. Negludiniet un nežāvējiet.
- Pārbaudiet krustveida savienojuma uzgriezni, ja tas ir vajāgs, pievelciet ar uzgriežņu atslēgu.

DARBĪBA	REGULARITĀTE
---------	--------------

Krēsla salocīšana un piederumu pārbaude	Katru dienu
Skrūvju un uzgriežņu stāvoklis	Reizi nedēļā
Pumpējamie riteņi	Reizi nedēļā
Stumšanas disku stāvoklis	Reizi nedēļā
Bremžu stāvoklis	Katru dienu
Tīrīšana	Katru dienu
Plaisu pārbaude	Reizi nedēļā
Eļļošana	Reizi nedēļā
Polsterējums	Reizi nedēļā
Demontāžas mehānisms	Reizi mēnesī
Regulējamās detaļas	Reizi mēnesī
Gultņi	Reizi mēnesī

Giro Line modeļa specifiskā apkope un pārbaude

- Reizi nedēļā notīriet to ar mitru drānu un neitrālālu ziepjūdeni, ja nepieciešams.
- Periodiski ieeļļojiet svienojumus ar velosipēdu vai šujmašīnu eļļu.
- Regulāri pārbaudiet vai visi uzgriežņi un skrūves ir pievilktas.
- Mehāniska apkope jāveic pilnvarotam piegādātājam
- Ja pamanāt jebkādas strukturālas problēmas vai darbības traucējumus, nelietojiet ratīņkrēslu un sazinieties ar savu pilnvaroto tehnisko pakalpojumu sniedzēju.
- Vienmēr izmantojiet oriģinālās rezerves daļas. Pretējā gadījumā garantija tiks anulēta.

9.- Produkta pārstrāde



Kad produkts ir kļuvis nelietojams un tas ir jāiznīcina, sazinieties ar savu specializēto izplatītāju.

Ja vēlaties to pārstrādāt pats, konsultējieties ar vietējo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu vai tuvāko pārstrādes centru.

10.- Produkta uzglabāšana



Ja produkts netiek pareizi uzglabāts, tas var tikt bojāts, izraisot negadījuma risku.

Neglabājiet šo produktu ilgu laiku siltuma avota tuvumā vai saulē (piemēram, loga priekšā vai radiatora tuvumā) vai aukstuma avota tuvumā.

Neuzglabāt produktu liesmu un dzirksteļu tuvumā.

Uzgabāt produktu šādi:

Uzglabāt sausā un vēsā vietā.

Sargāt produktu no putekļiem, rūsas, iesaiņojot maisā to vai, iepakojot kastē.

Glabājiet visas noņemtās detaļas vai komponentus kopā vienuviet, lai tie nesajauktos ar kaut ko citu vai nepazustu.

- Nenovietojiet nekādus smagus uz sastāvdaļām (nenovietojiet smagus priekšmetus uz izstrādājuma)

11.- Paredzamais kalpošanas laiks

Produkta paredzamais lietderīgais lietošanas laiks ir 3 gadi normālos lietošanas, drošības un apkopes apstākļos. Pēc šī laika produktu var lietot tik ilgi, kamēr tas ir ideālos lietošanas un apkopes apstākļos. Dažas daļas vai komponenti jebkurā gadījumā var būt jānomaina normāla nolietojuma dēļ tsākā laikā par šo laiku.

12.- Garantijas nosacījumi un serviss

Garantijas nosacījumi::

Garantija uz detaļām un ražošanas defektiem attiecas tikai uz oriģinālajiem Forta izstrādājumiem, kas iegādāti no pilnvarotiem izplatītājiem.

Garantija ir spēkā 3 gadus no iegādes datuma konstrukcijai un komponentiem, ievērojot tālāk norādītos nosacījumus:

- Tikai oriģinālajiem FORTA izstrādājumiem, kas iegādāti no pilnvarotiem izplatītājiem, attiecas garantija uz detaļām un ražošanas defektiem.
- Par jebkādiem produkta defektiem nekavējoties jāpaziņo pārdevējam.
- Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par defektiem, kas radušies nepareizas lietošanas, nolaidības vai šajā rokasgrāmatā sniegto norādījumu neievērošanas dēļ.
- Garantijas laikā Forta bez maksas salabos vai nomainīs jebkuru detaļu, kas izrādīsies bojāta nepareizas montāžas vai materiālu dēļ.
- Garantija tiek pilnībā anulēta, ja izstrādājumam tiek veiktas nepareizas modifikācijas vai pielāgojumi, vai, ja tiek uzstādītas detaļas vai papildaprīkojums, kas nav piegādāts produkta modelim.
- Garantija neattiecas uz rūsas bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai nolaidības, vai darbības, vai šķidruma, vai gāzes dēļ, kas var sabojāt izstrādājumu.

GARANTĪJA NESEDZ NEKĀDU CEĻOJUMA PROBLĒMU SEKĀM, ĪPAŠI JAUTĀJUMIEM, KAS SAISTĪTI AR TRANSPORTU, PEĻŅAS NEIZDEVUMIEM, IZDEVUMIEM UTC.

Forta neuzņemās nekādu atbildību šādos apstākļos:

- Normāls produkta nolietojums vai neatbilstoša/nepareiza ietošana.
- Pircēja vai trešās personas veiktās montāžas vai remonta defekti.
- Neuzmanīga rīcība, apkope vai nepiemērotu detaļu izmantošana.
- Remonts vai modifikācijas, kas veiktas neoficiālās darbīcās.
- Forta neuzņemas atbildību par jebkādu kaitējumu vai zaudējumiem, kas radušies lietotājam vai jebkurai trešajai pusei jebkura produkta modifikācijas vai izmaiņu rezultātā.
- Garantija neietver arī modifikācijas, kas veiktas, izmantojot neoriģinālās rezerves daļas.

Garantijas sertifikāts jānosūta uz FORTA, S.L. kopā ar pirkuma rēķina fotokopiju 15 dienu laikā no pirkuma datuma. Lai apstiprinātu garantiju, lietotājam ir jāiesniedz garantijas sertifikāts, uz kura ir zīmogs tās tirdzniecības vietas zīmogs, kurā prece tika pārdota. Garantijas sertifikātu varat lejupielādēt šeit: www.fortasl.es/en/manuales/doc/GARANTIA CONTRACTUAL.pdf.

13.- Veiktā testēšana un izmēģinājumi

FORTA produkti atbilst Medicīnas ierīču Direktīvas MDR (EU) 2017/745, IV pielikumam, ir ar CE marķējumu un ir izstrādāti un pārbaudīti saskaņā ar UNE-EN ISO 12183:2014. Forta ir pienākums apliecināt savu produktu atbilstību vairākām būtiskām prasībām. Ir standarts, kas nosaka pārbaudes un testēšanas metodes, lai pierādītu produktu atbilstību šīm prasībām. Standarti, kuriem produkts atbilst, ir uzskaitīti zemāk:

Īss attiecīgā likuma apraksts	Pašreizējais likums
Ražotāja sniegtā informācija	UNE-EN 1041:2009+A1:2014
Kvalitātes pārvaldības sistēma	UNE-EN ISO 13485:2018
Riska pārvaldība	UNE-EN ISO 14971:2020
Medicīnisko ierīču un manuālo ratiņkrēslu testēšana	UNE-EN 12182:2012 UNE-EN 12183:2019
Medicīnisko ierīču bioloģiskais novērtējums	UNE-EN ISO 10993-1:2021
Ugunsdrošības testi	UNE-EN 1021-1:2015 UNE-EN 1021-2:2015
Maksimālā kravnesība	140 kg

14.- Ražotājs

FORTA - FABRICACIONES ORTOPÉDICAS ALBACETE, S.L.

Pq. Emp. Campollano, c/C 90 Nave 1

02007 Albacete

España - Spain

info@fortasl.es
www.fortasl.es



MADE IN EUROPE

