

Ierīce jāizmanto, stingri ievērojot rokasgrāmatā sniegtās drošības un lietošanas instrukcijas!

#### KONTRINDIKĀCIJAS:

- Nelietojiet, ja jums ir neizārstēti smadzeņu vai sejas bojājumi.
- Nelietojiet MYND uz citām vietām, izņemot pieri. Lietošana uz krūtīm vai kakla var ietekmēt sirdsdarbību vai implantētas ierīces, un var ietekmēt epilepsijas lēkmju sliekšni. Var ietekmēt arī uz ķermeņa nēsātās uzraudzības ierīces.
- Neizmantojiet MYND, ja jums ir sirds elektrokardiostimulators, implantēts defibrilators vai cita implantēta metāla vai elektroniska ierīce. Šāda lietošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, apdegumus, elektriskus traucējumus vai nāvi.
- Nelietot, ja ārstējamajā zonā ir: aktīvs vēzis vai aizdomas par vēzi, vai nediagnosticētas sāpes ar vēzi anamnēzē. Jāizvairās no stimulācijas tieši ar apstiprinātu vai iespējamu ļaundabīgu audzēju, jo tā var stimulēt augšanu un veicināt vēža šūnu izplatīšanos.